


EXPORT – IMPORT d'une base de données MDSmanager

Remarque :


Il est important que le poste receveur (import) ait une version du logiciel MDSmanager identique ou supérieure que le poste émetteur (export).

Etape 1 : EXPORT

Lancer le logiciel MDSmanager, cliquer sur l'icône gestion  puis cliquer ensuite sur l'onglet « Export des données ».

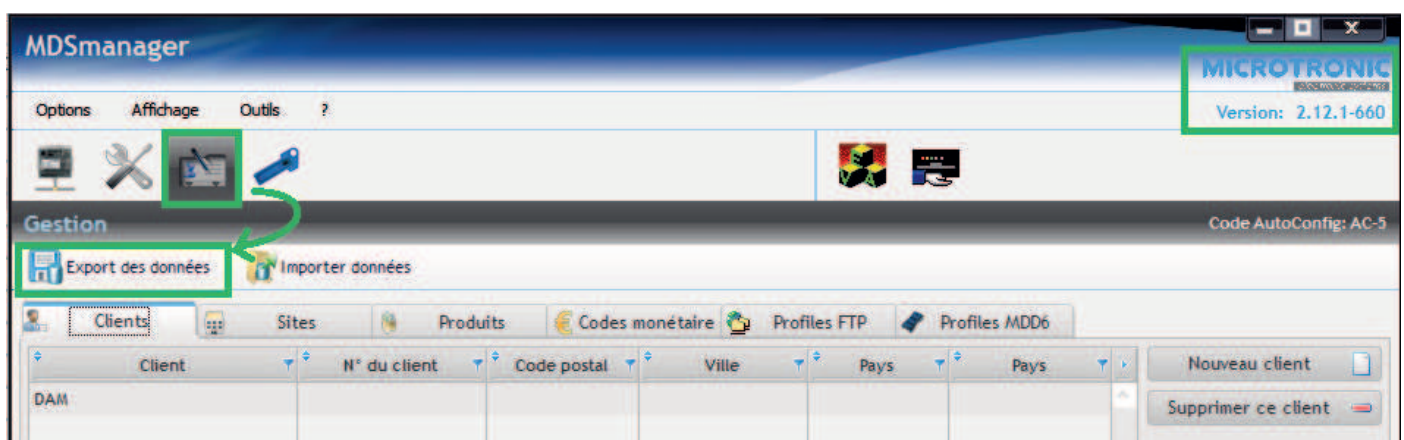


Sélectionner « Toutes les données ».

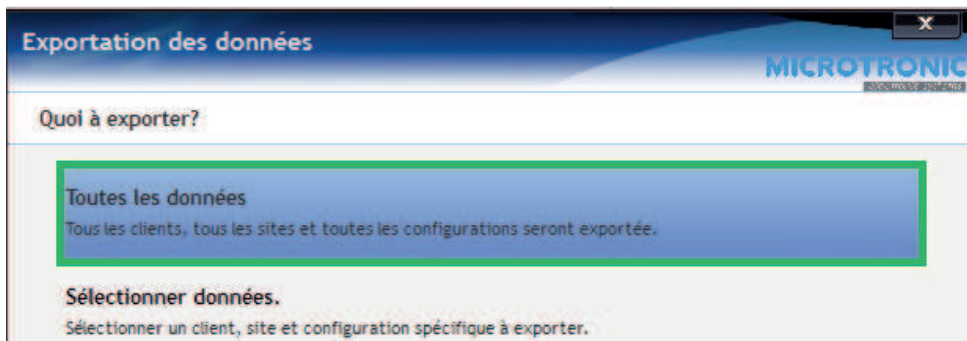


Choisir l'emplacement de la sauvegarde via le bouton  ci-dessous. Dans cet exemple, le fichier de sauvegarde **MDSmanager_Data_2016-09-13.6mdx** se fera dans le dossier « Desktop » (ou « bureau » en français) de l'ordinateur présent nommé VANG-TECH.

NB : Vous pouvez définir l'emplacement directement sur une clé USB s'il faut transférer votre base.

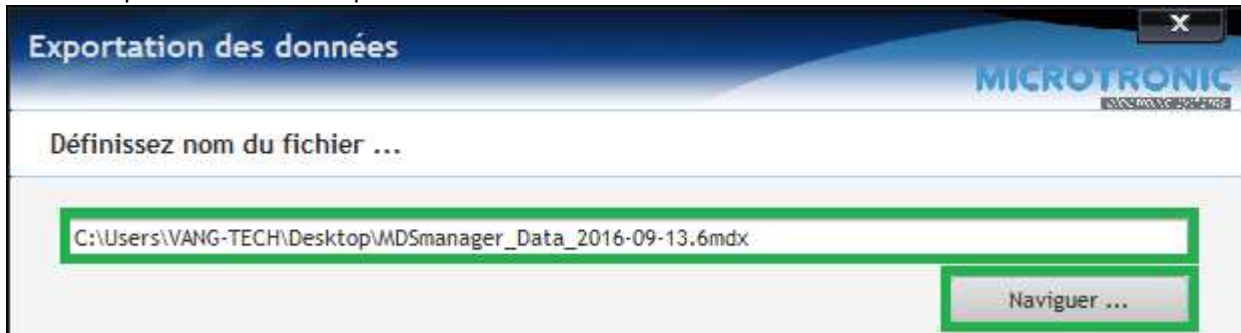


Une fois l'emplacement défini, faire « Suivant » pour continuer. Une barre de chargement vous indiquera la progression de votre sauvegarde.

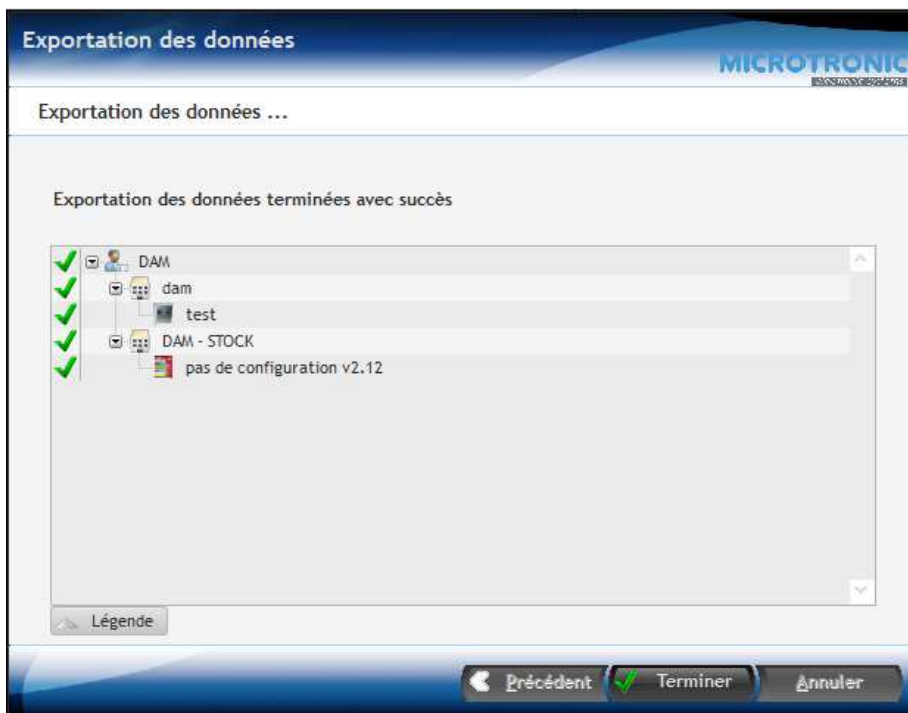


Cliquer sur « Terminer ». Vérifier ensuite que votre fichier a bien été créé dans le dossier précédemment défini.

Etape 2 : IMPORT

Sur votre nouvel ordinateur, une fois l'installation de la licence MDSmanager terminée, lancer le logiciel.

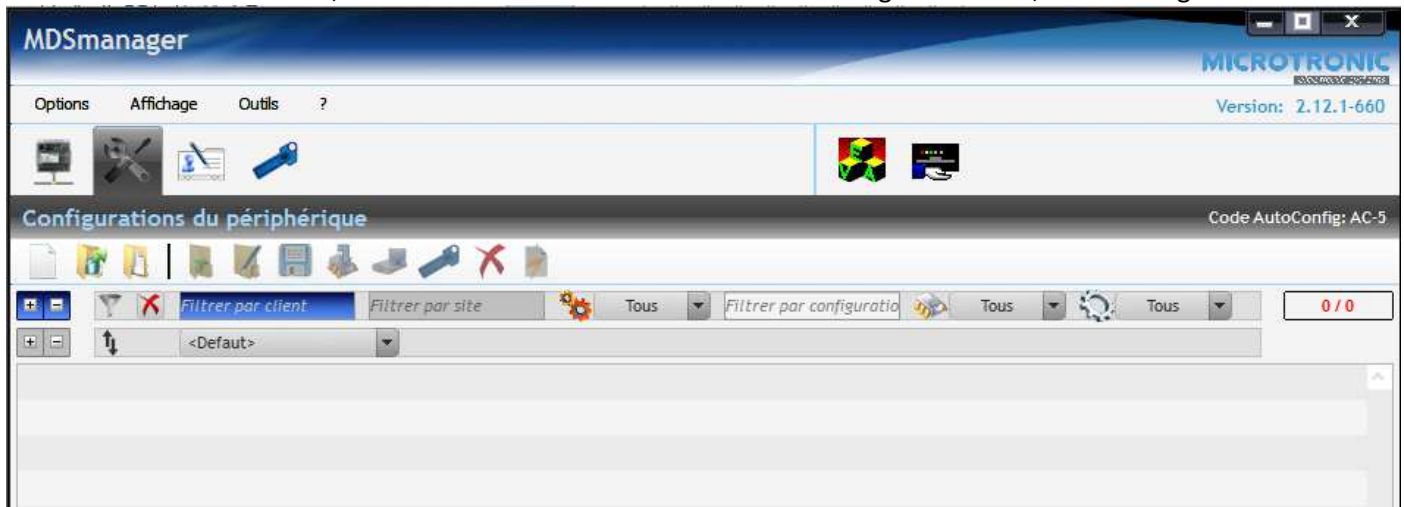

Retourner sur l'icône gestion  puis cliquer ensuite sur l'onglet « Importer données ».

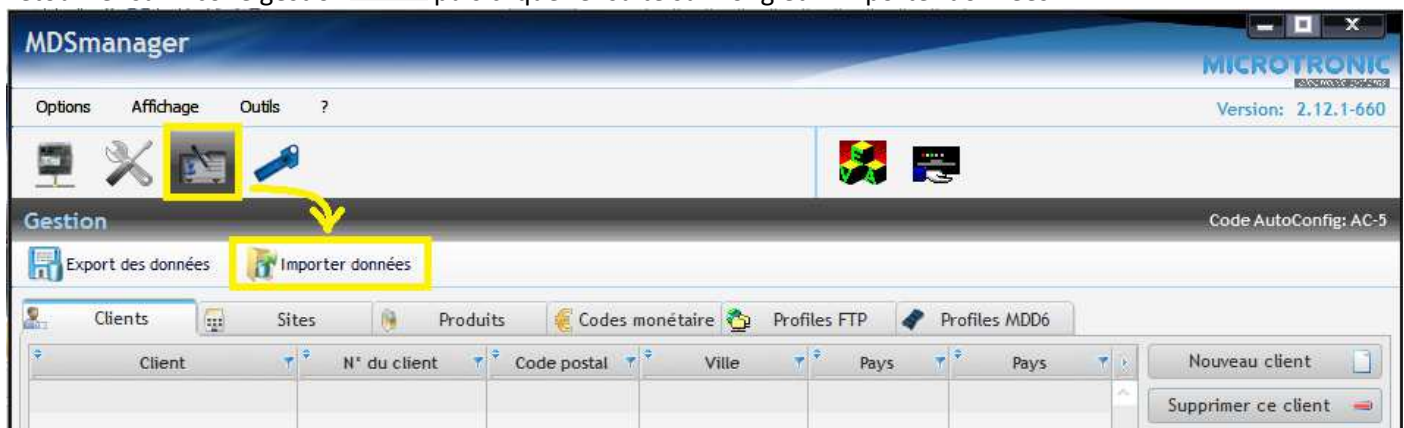

Récupérer le fichier de sauvegarde **MDSmanager_Data_2016-09-13.6mdx** de votre clé USB en cliquant sur le bouton




Une fois l'emplacement défini, faire « Suivant » pour continuer.

Sélectionner toute la base de données du précédent poste puis « Suivant »



Sélectionner « Ne pas importer ces données » puis « Suivant ».

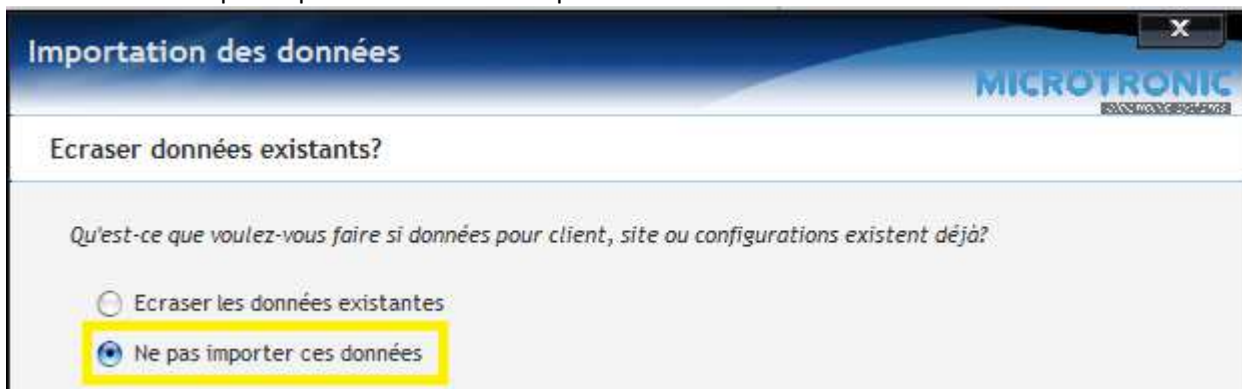

Une barre de chargement vous indiquera la progression du transfert de base de données.



Cliquer sur « Terminer ». Vérifier ensuite que vos configurations ont bien été importées en cliquant sur l'icône

« Configuration » .